

Procédure d'entretien

Fréquence d'entretien

Une fois par jour, selon les recommandations de l'ANSM.
(source : Recommandations aux professionnels de santé pour l'utilisation partagée des lecteurs de glycémie – Mise à jour du 06/01/2003 – ansm.fr)

Systématiquement si vous constatez des traces de sang.
Selon les procédures en vigueur dans votre établissement.

Procédure de nettoyage

Nettoyez l'extérieur du lecteur délicatement à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé de l'une des solutions nettoyantes recommandées suivantes (retirez tout excès de liquide) :

Solutions de nettoyage recommandées

Alcool isopropylique à 70%
Mélange de liquide vaisselle doux et d'eau
Solution d'eau de Javel à usage domestique à 10 %
(1 dose d'Eau de Javel pour 9 doses d'eau)
préparée le jour-même

Recommandations importantes

Ne pas faire pénétrer le moindre liquide dans aucune ouverture du lecteur.

Ne pas vaporiser une solution nettoyante directement sur le lecteur Accu-Chek® Guide.

Ne pas immerger le lecteur dans l'eau ou d'autres liquides.

Contrôle qualité

Ce test permet de vérifier si le système lecteur-bandelettes fonctionne correctement.



Insérez la bandelette, après avoir vérifié la date de péremption inscrite sur le flacon. Essuyez l'embout du flacon de solution de contrôle avec un mouchoir en papier, pressez doucement le flacon pour former une petite goutte. Mettez la goutte en contact avec l'extrémité jaune de la bandelette réactive et essuyez à nouveau l'embout du flacon.

Affichage du résultat




Rés. contrôle et le symbole du flacon de la solution de contrôle s'affichent à l'écran. Appuyez sur la touche ▼ ou ▲ pour sélectionner le niveau de contrôle (Control 1 pour le niveau 1 ou Control 2 pour le niveau 2) que vous avez utilisé pour le test de contrôle. Si vous ne sélectionnez pas de niveau, le lecteur enregistre le résultat de contrôle sans niveau de contrôle. Appuyez sur la touche **OK**.

Interprétation des résultats des contrôles



Dans l'objectif et le symbole ✓ s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe dans l'intervalle.

ou

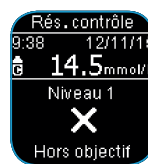

Hors objectif et le symbole ✕ s'affichent à l'écran si le résultat de contrôle se situe hors de l'intervalle.

Quand est-il recommandé de réaliser un contrôle de qualité ?

- A l'ouverture d'une boîte de bandelettes réactives neuve.
- Si vous avez laissé le tube de bandelettes réactives ouvert.
- Si vous pensez que les bandelettes réactives sont endommagées.
- Si vous souhaitez vérifier le fonctionnement du lecteur et des bandelettes réactives.
- Si vos bandelettes réactives ont été exposées à des températures excessives, à l'humidité ou aux deux.
- Si vous avez laissé tomber le lecteur.
- Si votre résultat glycémique ne correspond pas à votre état de santé.
- Si vous désirez vous assurer que vous effectuez la mesure de glycémie correctement.

Matériel nécessaire

Solutions Accu-Chek® Guide. Péremption 3 mois après ouverture du flacon. Écrire la date d'ouverture sur l'étiquette du flacon.

Fréquence du contrôle

en vigueur dans votre établissement :

