



Travail en l'absence d'enregistrement du patient dans pastel

Pour avec les automates AFINION HEMOCHRON ISTAT

Dans certaines situations nous pouvons être amenés à prendre en charge des patients qui n'ont pas encore eu d'admission dans le système pastel de l'hôpital

- SMUR en sortie à l'extérieur
- Patient admis sans identité aux urgences pédiatriques
- Transfert en urgence en coronarographie directement par le SMAU

Pour travailler sur les automates il est nécessaire d'avoir un identifiant sous forme de code à barre.

Les équipes disposent de planches d'étiquettes code à barre correspondant à une préadmission.

Cette planche d'étiquette est présente dans une pochette qui accompagne l'équipe paramédicale.

Ces documents sont fournis par le bureau des admissions de l'hôpital à l'infirmière référent qui se charge de la bonne préparation des pochettes.

- Lors de l'analyse l'équipe utilise une planche d'étiquettes par patient pour l'identification sur l'automate.
- Cette planche d'étiquettes sert aussi à identifier d'éventuels prélèvements sanguins réalisés.
- Elle sera complétée manuellement par le nom et le prénom du patient.
- Une étiquette est collée sur la fiche de liaison avec les indications de nom et de prénom
- La feuille de liaison est donnée aux admissions avec la planche d'étiquettes et la feuille d'information démographique. L'admission est rapidement réalisée.
- Les admissions admettent le patient sous le numéro d'IEP utilisée lors de l'intervention
- Les éventuels tubes sont apportés au laboratoire avec une feuille de demande étiquetée avec les nouvelles étiquettes comprenant la démographie complète du patient.
- L'ensemble de ces informations sont sur la fiche de liaison qui ensuite est transmise au laboratoire



PATIENT SANS ETIQUETTES PASTEL

ISTAT- HEMOCHRON – AFINION

POUR L'EQUIPE PARAMEDICALE

UTILISER LA PLANCHE AVEC LES ETIQUETTES DE PREADMISSION

**Coller l'étiquette patient
(Remplir les informations du
patient sur l'étiquette)**

Donner cette fiche aux admissions pour l'enregistrement dans PASTEL

POUR LES ADMISSIONS

FAIRE LE DOSSIER PASTEL EN UTILISANT LES INFORMATIONS DE L'ETIQUETTE

- Ne pas créer de nouvelle venue
- Cliquer sur l'icône : ADMISSIONS
- Cliquer sur VENUE et choisir REPRISE
- IEP saisir le numéro d'IEP de l'étiquette du mode dégradé et sélectionner CONSULTATION EXT
- Faire l'admission avec la fiche administrative que l'équipe CORO vous a remise.

DATE

ADMISSION PAR

Transmettre la fiche au laboratoire –technicien référent